

TRS - Bruksanvisning



1. Preparatpåsen ligger öppen i förpackningen. Dra i handtaget för att dra in påsen i röret.




5. Tryck på den lila knappen samtidigt som du trycker handtaget framåt och spärren kommer då släppa från påsen.




2. För in röret i en för produkten lämplig trokar.



6. Dra handtaget bakåt för att lösgöra påsen från hållaren.

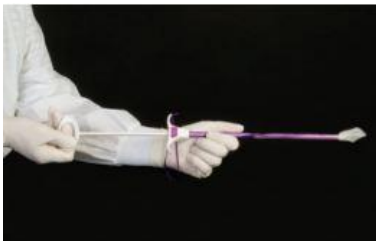

3. Skjut ut påsen från röret och i samband med det kommer påsen att automatiskt att veckla ut sig.

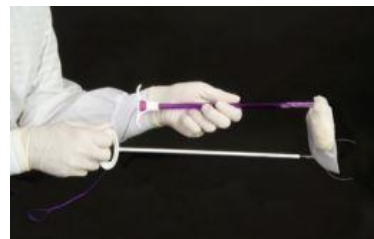

7. Dra i det lila snöret för att försluta påsen.



4. Lägg preparatet i påsen.